


Liste des considérations singulières Pour la canulation EndoAVF

WavelinQ™ EndoAVF System



Les bases de l'EndoAVF

- Sans cicatrice chirurgicale
- Il peut exister plusieurs options de veines de canulation

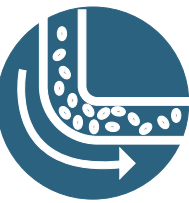


Identifiez le type d'accès et la direction du flux sanguin

- Référez-vous aux recommandations du médecin pour les sites de canulation
- Utilisez un garrot pour faciliter l'accès aux vaisseaux selon le protocole standard




Choix du site de l'aiguille

- Le flux artériel ou veineux (entrée/sortie) de l'accès au dialyseur peut être interchangé à des fins de résolution des problèmes de flux sanguin

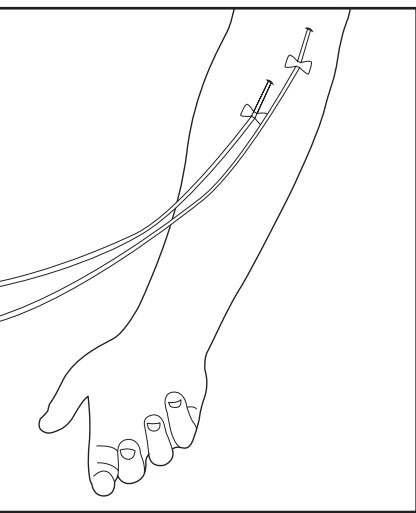


Deux aiguilles,
un seul vaisseau

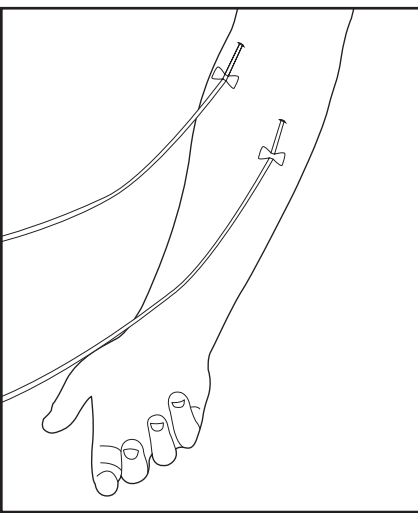

Deux aiguilles,
des vaisseaux séparés

- L'aiguille de sortie peut être plus distale que l'aiguille d'entrée si elle est placée dans une veine différente de celle de l'aiguille d'entrée

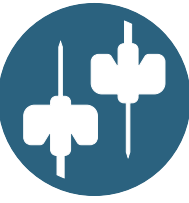

Choix de l'aiguille

- Suivez le protocole clinique et/ou l'ordonnance du médecin en ce qui concerne le calibre et la progression de l'aiguille
- La longueur peut être modifiée ; **une aiguille plus courte peut être plus avantageuse** pour les zones de canulation superficielles et pour certaines morphologies



Technique de canulation

- L'angle d'insertion de l'aiguille dépend de la profondeur de la veine auriculaire ; envisagez un angle faible pour les veines plus superficielles
- Soyez prudent afin de ne pas bloquer l'extrémité de l'aiguille sur le côté ou en arrière. L'endoAVF est plus souple qu'une FAV chirurgicale au niveau du bras lorsque la pointe de l'aiguille pénètre dans le vaisseau. Le retour de sang se produira, mais il peut être moins vigoureux que dans le cas d'une FAV chirurgicale.



Conseils généraux pour réussir

- Envisagez la gestion de pathologies telles que l'hypotension et la déshydratation des patients avant de procéder à l'aiguilletage, car ces conditions peuvent compliquer la canulation



Vous avez des questions?

Visitez : www.bd.com/wavelinq
Appelez : Assistance et services médicaux
800-555-7422
Email : WavelinQCannulation@bd.com

Veine céphalique
Veine basilique

Articulation
du coude

Veine cubitale médiane

Création de l'EndoAVF
Options de site :

Veine radiale - Artère radiale

Veine cubitale - Artère cubitale

LÉGENDE
Zone de canulation